


CleanCut™

Autopsiesägen
und
Absaugsystem

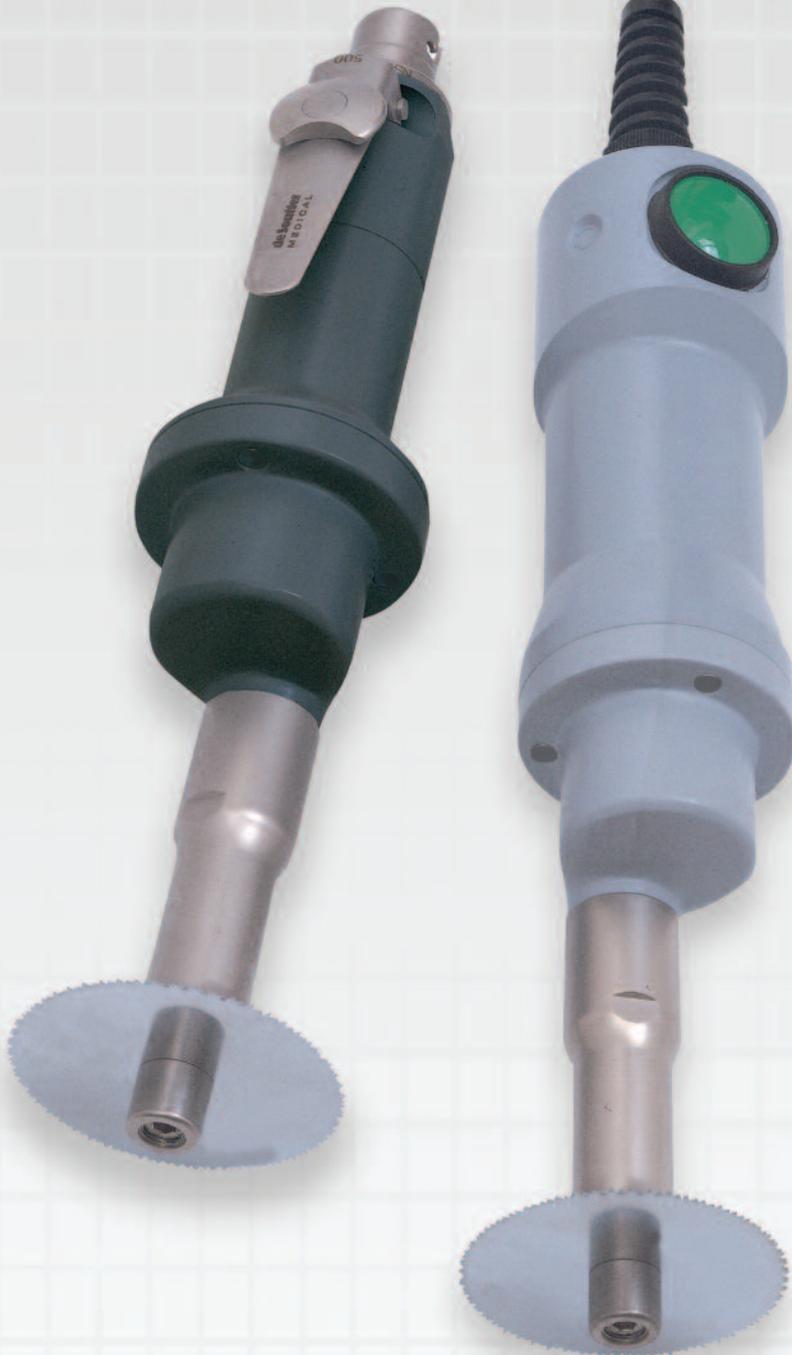

de Souther
MEDICAL

CleanCut™ Sägesysteme

Für Schutzspannung und Druckluft

Das De Soutter CleanCut™ Autopsiesägen-System besteht aus Handsäge und einer Saugereinheit, die die höchsten Ansprüche bei der Absaugung und Mikro-Ausfilterung pathogener Partikel erfüllt.

Die Säge arbeitet mit 42 V Sicherheitsspannung und kann unter einem Flüssigkeitsstrahl bzw. durch Eintauchen in ein Desinfektionsbad gereinigt werden.



Die Klarsichtsaughaube lässt sich in die günstigste Arbeitsposition drehen. Der 3 m lange Saugschlauch besitzt eine glatte Innenwand. Dies ermöglicht ein optimales Spülen zur Reinigung und Desinfektion.



Der schlanke Hals erlaubt eine Anwendung auch in engen Körperbereichen.

Die Schwingzahl der Säge ist an dem Steuergerät stufenlos von Null bis Maximum regelbar. Das Steuergerät ist für eine bessere Reinigung gegen Spritzwasser geschützt.



Autopsiesäge mit Steuergerät NS3A

NS3 - Technische Daten

Schwingzahl	0-14000
Spannung	42 V DC
Motorschutz	Überlastungsschutz, Autoreset
Einschaltdauer	Für den Dauerbetrieb geeignet
Anschlusskabel	4 Meter lang
Länge	275 mm
Gewicht	1,15 kg
Geräuschpegel	70 dB(A)

Flüssigkeitsschutz: IP 67 voll wassergeschützt gegen Eindringen von Flüssigkeiten.
Eintauchtiefe bis 1 m Wassertiefe.



NS3 Autopsiesäge
Elektrisch

NS170 Autopsiesäge - Druckluft

Autoklavierbar bei 134°



Schwingzahl	17000 f/min
Luftverbrauch	3,3 l/s
Betriebsdruck	7 bar
Länge	267 mm
Gewicht	0,86 kg
Geräuschpegel	75 dB(A)
Bestell-Nr.	222664

Sägeblätter sowie Koaxial-Druckluftschläuche - siehe Seite 4.



Zwei Saugstufen wählbar für volle bzw. ruhigere mittlere Leistung.

Säge und Saugereinheit werden gleichzeitig durch den grünen Startknopf an der Säge eingeschaltet. Nach Abschaltung der Säge läuft die Saugereinheit 5 Sekunden weiter, um die Saughaube und den Schlauch zu entleeren.

Clean Cut System mit Saugereinheit CNS3A

Die Saugereinheit besitzt 5 Filterstufen für höchsten Gesundheitsschutz.

Filter 1: Der wechselbare Fliesbeutel wird geschlossen entsorgt.

Filter 2: Der Aussenbeutel mit Reissverschluss sammelt die Saugmasse, falls der Fliesbeutel beschädigt sein sollte. Dieser Beutel ist waschbar und kann bei Bedarf entsorgt werden.

Filter 3 und 4: Diese schützen den Mikrofilter, falls der Fliesbeutel beschädigt oder unsachgemäß eingesetzt wurde. Beide Textilfilter sind waschbar bzw. können im Desinfektionsbad gespült und gereinigt werden.

Filter 5: ist der Mikro-Filter im Motorkopf der Saugereinheit. Dieser hält 99,997% aller Partikel die größer sind als 0,5 Mikron, zurück.

Steuergerät - Technische Daten

für Netzspannungen	wahlweise: 120 V oder 230 V
Sekundärspannung:	42 V DC
Leistung:	50-60 Hz
Sicherheits Reset	Selbstrückstellung
Spritzwasser geschützt	IP64
Gewicht	2,95 kg
Maße	LxHxB: 240 x 128 x 120

Saugereinheit - Technische Daten

für Netzspannungen	120 V bzw. 230 V
Motorleistung	1 kW
Netzspannung	50-60 Hz
Saugleistung	2500 mm Wassersäule
Geräuschspegel	58 dB (A)
Filterwirkungsgrad	99,997% >0,5 microns
Fliesbeutel-Inhalt	7,5 l

NS3 Säge mit Saugereinheit komplett

bestehend aus:	U.K. 230 V UK Stecker	Euro 230 V Euro Stecker	120 V mit USA-Stecker
NS3 Säge	Bestell-Nr. 1250444	1250444	1250444
Saugschlauch	Bestell-Nr. 5550	5550	5550
Saugereinheit mit Steuerblock	Bestell-Nr. 5280	7850	5270
System komplett - Bestell-Nr.	CNS3A-230UK	CNS3A-230EU	CNS3A-120

NS3 Säge mit tragbarem Steuergerät - ohne Saugereinheit







NS3 Säge	Bestell-Nr. 1250444	1250444	1250444
Steuergerät	Bestell-Nr. 605903	613573	606763
Säge mit Steuergerät - Bestell-Nr.	NS3A-230	NS3A-230EU	NS3A-120

CleanCut™ Zubehör

Sägeblätter und Schläuche

Sägeblätter

Sägeblätter - Originalgrösse
gehärteter Stahl, verchromt
* Mitgelieferte Sägeblätter

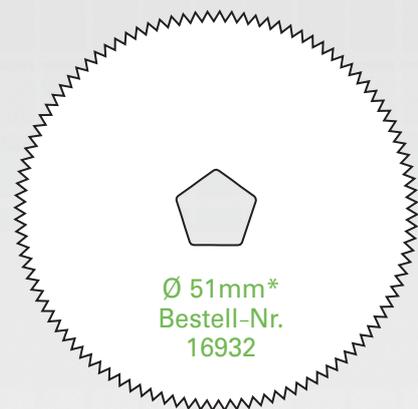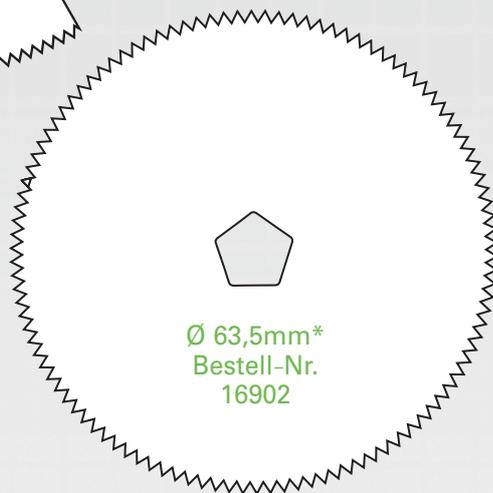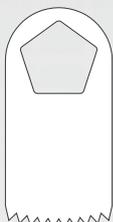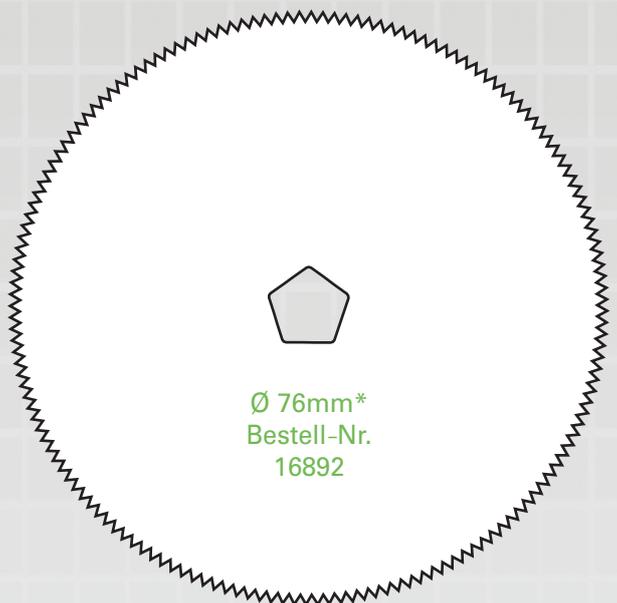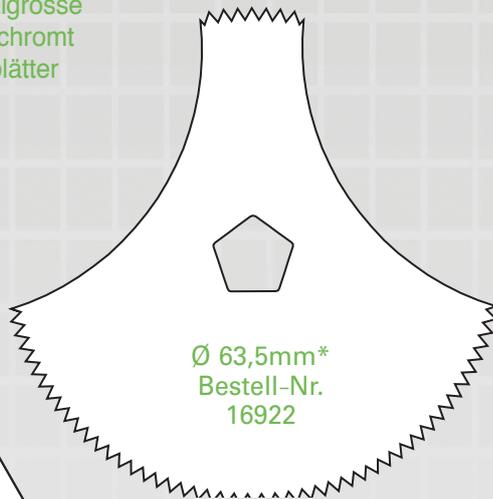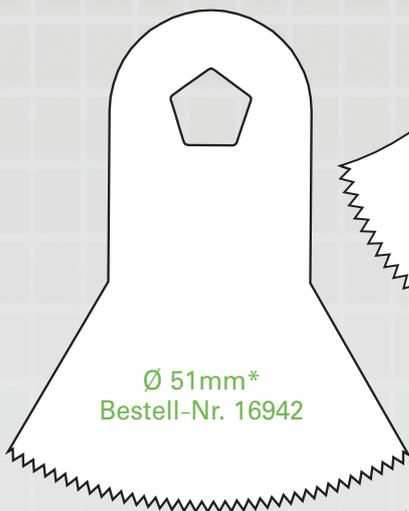

Zubehör

Verlängerungskabel für NS3 Säge, 3 m Bestell-Nr. 5500



Vlies-Wechselbeutel
Packung à 10 Stück
Bestell-Nr. 602763



Autopsie-Außenbeutel
Bestell-Nr. 5190

Druckluft-Schläuche für NS170-T

Koaxialschlauch mit
Schnellkupplung.

MA7 Kupplung
Weitere Kupplungen lieferbar

3 m Länge Bestell-Nr. 13000
4 m Länge Bestell-Nr. 13100
5 m Länge Bestell-Nr. 13200



De Soutter Medical Deutschland

Bahnhofstraße 4
D-66625 Nohfelden
Tel: +49 (0) 68 52-99 12 46 Fax: +49 (0) 68 52-99 12 47
Email: deutschland@de-soutter.com
www.de-soutter.com

De Soutter Medical Austria

Zweigniederlassung Österreich
Dietrichsteingasse 10, A-3400 Klosterneuburg
Tel: +43 (0) 676 96 71 770 Fax: +43 (0) 2243 21 656
Email: austria@de-soutter.com
www.de-soutter.com

116-D-9

deSoutter
MEDICAL